

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ФС ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ



Инструкция по применению ортопедических изделий

Medical Line



Корсеты ортопедические жесткие

LSO-991

LSO-981

Свойства товара (оказываемые эффекты):

Корсеты ортопедические жесткие Orlett, арт. LSO-991 и LSO-981 используются для полной фиксации, стабилизации и разгрузки позвоночника на уровне Th8-L5 (модель Orlett, арт. LSO-991) и на уровне Th12-L5 (модель Orlett, арт. LSO-981). По назначению врача могут заменять громоздкие и тяжелые корсеты из гипса. Стабилизируют связочно-суставной аппарат, и уменьшают нагрузки на позвоночно-двигательные сегменты. Особенностью корсетов ортопедических жестких Orlett является легкий вес.

Показания к применению:

- травмы груднопоясничного (арт. LSO-991) и поясничного (арт. LSO-981) отделов позвоночника;
- повреждения связочно-суставного аппарата груднопоясничного (арт. LSO-991) и поясничного (арт. LSO-981) отделов позвоночника;
- острые боли в груднопоясничном (арт. LSO-991) и поясничном (арт. LSO-981) отделах позвоночника в период обострения остеохондроза;
- грыжи межпозвонковых дисков с признаками компрессии корешков;
- спондилолистезы с угрозой травмы корешков спинного мозга;
- травмы груднопоясничного (арт. LSO-991), поясничного и крестцового (арт. LSO-981) отделов позвоночника;
- состояния после операций на груднопоясничном (арт. LSO-991) и поясничном (арт. LSO-981) отделах позвоночника;
- мышечные дистрофии;
- распад тел позвонков (туберкулез, остеомиелит, онкология).

Режим и сроки ношения:

Режим и сроки ношения корсетов ортопедических жестких назначает лечащий врач.

Противопоказания:

- беременность;
- диафрагмальные грыжи;
- патологии брюшной стенки (грыжи, свищи);
- синдром портальной гипертензии.

Предупреждения:

- в случаях гнойных заболеваний и/или заболеваний кожи в области применения корсета необходима консультация лечащего врача;
- корсет следует надевать на нижнее белье, плотно прилегающее к телу;
- при возникновении физического дискомфорта или раздражения следует немедленно проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего использования корсета.

Инструкция по применению корсета ортопедического Orlett, арт. LSO-991:

Конструкция корсета ортопедического Orlett, арт. LSO-991:

Корсет ортопедический Orlett, арт. LSO-991 состоит из следующих элементов (цифры на рис. 1, 2 соответствуют элементам конструкции):

1. легкая рама высокой прочности, устойчивая к механическим нагрузкам;
2. реклинирующая часть рамы;
3. мягкая прокладка (обеспечивает защиту и мягкое прилегание к телу);
4. поддерживающая вставка на животе с ребрами жесткости, предупреждающими скручивание и улучшающими фиксирующие свойства корсета;
5. шесть регулируемых затяжек с застежками-липучками «Велкро» (соединяют раму с поддерживающей ставкой);
6. регулируемые наплечные лямки с застежками-липучками «Велкро».

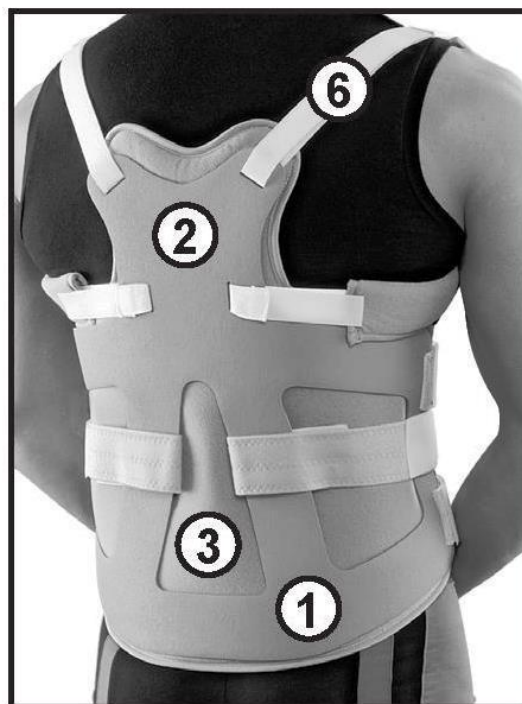


Рис. 1

Порядок надевания:

Корсет надевается в положении лежа.

1. Уложите пациента на корсет так, чтобы рама корсета с мягкой прокладкой (1, 3, рис. 1) плотно прилегала к гребням подвздошных костей.
2. Расположите на передней брюшной стенке поддерживающую вставку (4, рис. 2).
3. Пропустите регулирующие затяжки (5, рис. 2) через поворотные петли на вставке.
4. Отрегулируйте центральное расположение вставки и силу натяжения затяжек, натягивая правую и левую затяжки. Закрепите затяжки с помощью застежек-липучек «Велкро».
5. Отрегулируйте центральное положение реклинирующей части рамы (2, рис. 1), силу фиксации и разведение плечевого пояса с помощью наплечных лямок (6, рис. 1, 2).



Рис. 2

Инструкция по применению корсета ортопедического Orlett, арт. LSO-981:

Конструкция корсета ортопедического Orlett, арт. LSO-981:

Корсет ортопедический Orlett, арт. LSO-991 состоит из следующих элементов (цифры на рис. 3, 4 соответствуют элементам конструкции):

1. легкая рама высокой прочности, устойчивая к механическим нагрузкам;
2. мягкая прокладка (обеспечивает защиту и мягкое прилегание к телу);
3. поддерживающая вставка на животе с ребрами жесткости, предупреждающими скручивание и улучшающими фиксирующие свойства корсета;
4. шесть регулируемых затяжек с застежками-липучками «Велкро» (соединяют раму с поддерживающей вставкой).



Рис. 3

Порядок надевания:

Корсет надевается в положении лежа.

1. Уложите пациента на корсет так, чтобы рама корсета с мягкой прокладкой (1, 2, рис. 3) прилегала к поясничной области.
2. Расположите на передней брюшной стенке поддерживающую вставку (3, рис. 4).
3. Пропустите регулирующие затяжки (4, рис. 4) через поворотные петли на вставке.
4. Отрегулируйте центральное расположение вставки и силу натяжения затяжек, натягивая правую и левую затяжки.
5. Закрепите затяжки с помощью застежек-липучек «Велкро».



Рис. 4

Правила подбора:

Для подбора размера корсетов ортопедических жестких Orlett, арт. LSO-991 и LSO-981 сантиметровой лентой плотно, но не утягивая измерить окружность талии и бедер.

Согласно полученным результатам подобрать корсет Orlett по таблице подбора размеров.

Размер	Сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам (см)
S	75-90
M	90-105
L	105-120
XL	120-135

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить корсеты. Важно, чтобы корсеты были удобны.

Правила ухода:

Перед стиркой мягкую прокладку отделить от пластиковой рамы. Пластиковые части корсета необходимо протереть влажной неабразивной тканью, с использованием дезинфицирующих растворов, не содержащих хлора и химически активных средств. Для мягкой части предусмотрена ручная стирка при температуре не выше +40°C. Не применять моющие и отбеливающие средства, содержащие хлор. Не применять машинную сушку. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. После стирки мягкую прокладку закрепить на раме с помощью застежек «Велкро».



Состав изделия:

Корсеты Orlett, арт. LSO-991 (серый) и LSO-981 (серый): 100% мягкий поролоновый ламинат (детали из ткани), 100% пластик (детали из пластмассы)

Корсеты Orlett, арт. LSO-991 (черный) и LSO-981 (черный): 60% нейлон, 30% полиуретановая пена, 5% полиэстер, 5% хлопок

Условия хранения:

Корсеты должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации:

Корсеты утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности:

Срок годности не установлен.

Возможность использования корсетов дольше, чем предписано курсом лечения должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования корсетов без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции корсетов. Не допускается эксплуатация поврежденных корсетов.

Комплектность:

Для корсета Orlett, арт. LSO-991: ортопедическое изделие арт. LSO-991, инструкция по применению.

Для корсета Orlett, арт. LSO-981: ортопедическое изделие арт. LSO-981, инструкция по применению.

Гарантийный срок:

6 месяцев с момента продажи корсета при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению; дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуатации или хранения, правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Зарегистрировано в ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РУ № ФСЗ 2011/09549 от 12.04.2011 г.

Производитель: Рехард Технолджис ГмбХ,

Германия, 04316, Лейпциг, Херманн-Сандер штрассе 27.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127124, Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 1.

Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я № 60.